

ES - ESPAÑOL

MASCARILLAS HIGIÉNICAS REUTILIZABLES (MÁXIMO LAVADOS 25)

BFE \geq 95%; RESPIRABILIDAD $<38\text{Pa}/\text{cm}^2$ ITEL CE-11746

La mascarilla higiénica no exime al usuario de la aplicación de gestos barrera complementados por las medidas de distanciamiento social que son esenciales conforme con las recomendaciones indicadas por las Autoridades Sanitarias:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Procedimiento_COVID_19.pdf

NOTA Las medidas de protección colectiva son prioritarias sobre las medidas de protección individual.

Para que la mascarilla sea efectiva se debe usar correctamente según se indica a continuación, por esta razón, la colocación, el uso y la retirada de las mascarillas higiénicas para niños debe ser supervisada por un adulto.

Colocación de la mascarilla (Es necesaria la supervisión de un adulto):

Se recomienda colocar la mascarilla sobre la piel desnuda, (es decir, sin la presencia de cabello en contacto con la piel del usuario y en el caso de adultos y para algunas personas piel afeitada), y respetar los siguientes pasos:

1. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica antes de manipular la mascarilla.
2. Identificar la parte superior de la mascarilla.
3. Posicionar la mascarilla en la cara, a la altura de la nariz.
4. Sostener la mascarilla desde el exterior y sujetar esta a ambos lados de las orejas, sin cruzarlos.
5. Bajar la parte inferior de la mascarilla a la barbilla.
6. Verificar que la mascarilla cubre la barbilla.
7. Verificar que la mascarilla está colocada correctamente. Para esto es necesario verificar el sellado y la ausencia de las molestias respiratorias.

Una vez ajustada, no tocar la mascarilla con las manos. Si el usuario necesita tocar la mascarilla, debe previamente lavarse las manos con agua y jabón o frotárselas con una solución hidroalcohólica.

Retirada de la mascarilla (Es necesaria la supervisión de un adulto):

Para evitar la contaminación al retirar una mascarilla, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Si los utiliza, quitarse los guantes de protección;
2. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica.
3. Retirar la mascarilla sin tocar la parte frontal de la mascarilla;
4. Si se va a reutilizar la mascarilla o desechar la misma, siga las instrucciones de lavado o desechado detalladas en este manual.
5. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica.

Lavado y secado de la mascarilla.

Debe realizar un ciclo completo de lavado (humedecer, lavar, enjuagar), con el detergente neutro, a una temperatura de lavado de 60°C .

Lavar a máquina a 60°C / No usar cloro o lejías / No planchar / No lavar en seco / Secar a temperatura baja. Se debe evitar el contacto entre mascarilla sucia (a lavar) y la ropa limpia. La persona a cargo del lavado debe protegerse para manejar las mascarillas sucias. No se deben utilizar productos que puedan degradar o dañar los materiales y que disminuyan su capacidad protectora. Se recomienda que la mascarilla se seque completamente dentro de las 2h posteriores al lavado. Puede ayudarse de un secador de mano a baja temperatura para acelerar su secado. No se debe secar o higienizar con un horno microondas. Tanto durante el secado, como en el almacenaje posterior de la mascarilla, se deben evitar los ambientes en los que la mascarilla pueda volverse a contaminar.

Después de cada ciclo de lavado, se debe realizar una inspección visual (con guantes de protección o manos lavadas). Si se detecta algún daño en la mascarilla (menor ajuste, deformación, desgaste, etc.), se debe desechar la mascarilla.

Siguiendo las instrucciones indicadas, el material tras 25 lavados

comienza a perder propiedades.

Eliminación de la mascarilla.

Una vez alcanzado el número de lavados indicados, la mascarilla debe ser desechada para reducir los riesgos del uso de estas mascarillas.

Las mascarillas se deben desechar en un contenedor provisto de una bolsa de plástico (preferiblemente con tapa y control no manual), por ejemplo de tipo pedal.

Se recomienda utilizar doble bolsa para preservar el contenido de la primera bolsa en caso de desgarramiento de la bolsa exterior.

Si fuera factible, las mascarillas utilizadas también se pueden desechar en los contenedores para desechos biológicos.

Duración de uso máximo continuado.

Por cuestiones de comodidad e higiene, se recomienda no usar la Mascarilla por un tiempo superior a 4 h. En caso de que se humedezca o deteriore por el uso, se recomienda sustituirla por otra.

Durante el periodo de uso, la mascarilla solo se puede retirar de acuerdo con las instrucciones.

La mascarilla se debe lavar cada vez que se ensucie, humedezca o no se pueda colocar correctamente sobre la cara.

No se debe utilizar la mascarilla si está sucia o húmeda.

En el caso de que se vaya a almacenar temporalmente, se debe evitar el contacto con cualquier superficie no higienizada.

Tampoco se debe colocar en una posición de espera en la frente o debajo de la barbilla durante y después del uso.