



Mascarillas higiénicas Reutilizables después del lavado, hasta 30 veces Aptas para el público general



Talla adulto – blanco

2 mascarillas

Rendimiento

Rendimiento de los materiales determinado por los laboratorios DGA Maîtrise NRBC, 5 rue Lavoisier, 91710 Vert-le-Petit, Francia (RP / 20-3203 / DGA MNRBC / 2000305 / NP). Efectivas hasta después de **30 lavados** (informe IFTH 2020-04 -17-173-1):


Eficiencia de filtración para partículas de 3 µm >90%.

Respirabilidad: permeabilidad al aire (para una presión de vacío de 100 Pa) >96 L/m²/s.

Uso

Este paquete contiene dos mascarillas de uso diario.

El tiempo máximo de utilización de las mascarillas es de **4 horas**, después de este tiempo la mascarilla debe lavarse antes de su siguiente uso.

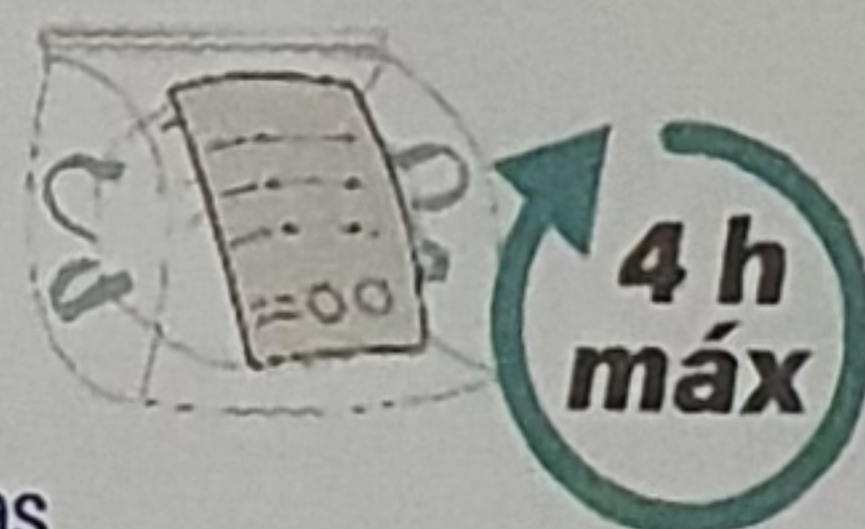


Para proteger su salud y la de los demás, es muy importante seguir las indicaciones de las instrucciones de uso. Si está enfermo, esta mascarilla no es adecuada, consulte con su médico.

Composición

Poliéster - Algodón - Polipropileno. Contiene látex.

Materiales certificados OEKO-TEX® (sin sustancias nocivas).

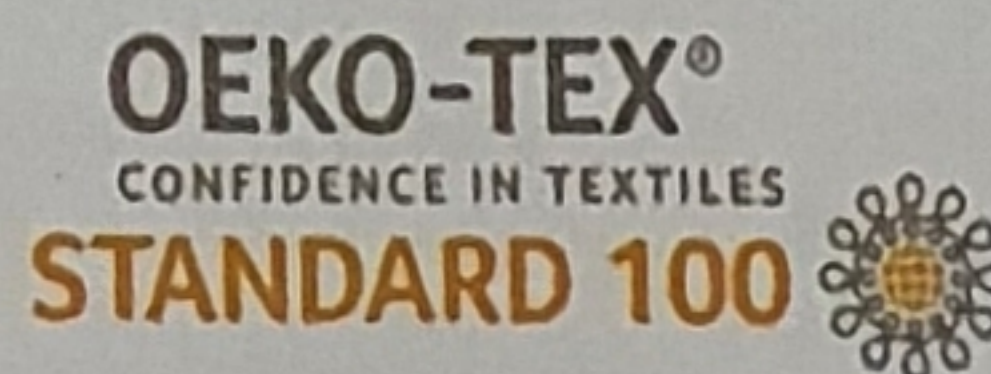

Esta mascarilla no es un producto sanitario que cumpla con el Reglamento EU/2017/45 (mascarillas quirúrgicas), ni es un equipo de protección individual que cumpla con el Reglamento EU/2016/425 (mascarillas con filtro tipo FFP2).

SPEC AFNOR S76-001 - V1.10 (Categoría 1 - Uso no sanitario 1). Especificación UNE 0065:2020

Mascarillas higiénicas reutilizables para adultos y niños.



Responsable y Fabricante:

SIMP Ortho Solutions
303 route de Brignais
69230 Saint-Genis-Laval
France


Distribuido por:

Alliance Healthcare España, S.A.
Pol. Ind. San Miguel Sector 4
50830 Villanueva de Gállego (Zaragoza), España
info@alvita.es

ALV5230/1

Cómo ponerse la mascarilla

Compruebe siempre que la mascarilla esté correctamente ajustada cubriendo su boca y nariz. Se recomienda usar esta mascarilla sobre la piel desnuda. La eficiencia de filtración puede reducirse fuera de los límites especificados en aquellas personas con barba.

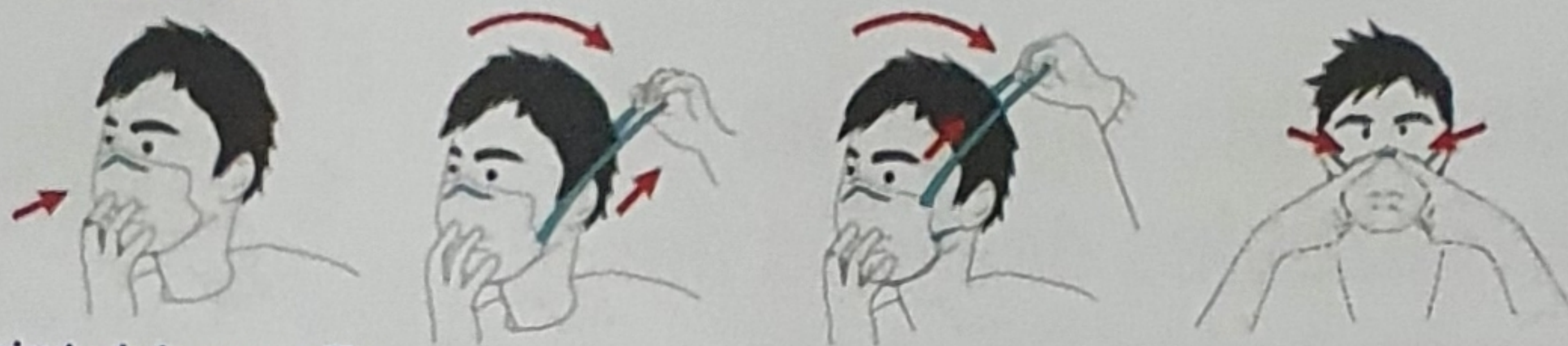

Mantenimiento de la mascarilla

Esta mascarilla se puede reutilizar hasta **30 veces**, siempre que se lave después de cada uso.

Después de usarla hasta un máximo de **4 horas**, la mascarilla se puede tirar o lavar.


Si va a tirar la mascarilla, debe introducirla de manera segura en una bolsa de plástico desechable cerrada antes de tirarla.

Si va a lavar la mascarilla, debe introducirla de manera segura en una bolsa de plástico desechable cerrada o en una bolsa reutilizable hasta el momento del lavado. Cuando lave la mascarilla, retírela de la bolsa reutilizable y coloque ambas en la lavadora.

Si ha utilizado una bolsa de plástico desechable, debe volver a cerrarla y desecharla de forma segura. Si se van a lavar varias mascarillas, es aconsejable marcar las iniciales de cada persona en la etiqueta interior con un bolígrafo indeleble o un rotulador permanente.

Lavado y secado

Una mascarilla usada debe lavarse a máquina con detergente para ropa convencional a 60 °C durante al menos 30 minutos. Se recomienda secarla completamente en las 2 horas posteriores al lavado. El secado puede realizarse con una secadora o al aire libre, seguido de planchado a baja temperatura con vapor. No se recomienda el lavado a mano.

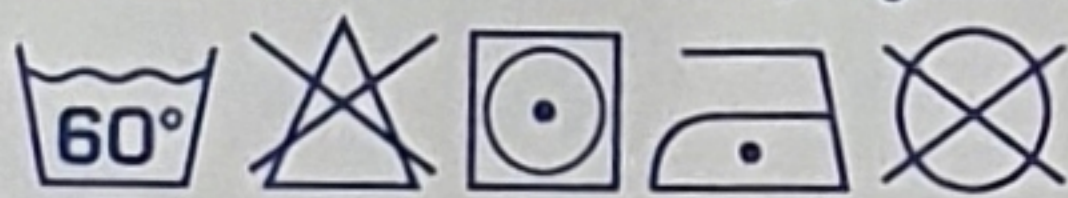

Conservación

Guarde las mascarillas sin utilizar en un lugar limpio y seco, protegido de la luz del sol.

Información adicional:

Esta mascarilla ha sido diseñada para ayudar a las personas durante la crisis de salud de la COVID-19. Esta mascarilla no reemplaza la necesidad de precauciones de salud adicionales (lavado regular de manos, distancia física, contacto reducido con otras personas). Añade una barrera física que permite al usuario proteger su entorno de las proyecciones de partículas. También puede proporcionar al usuario una protección limitada contra agentes infecciosos.

Para protegerle a usted y a otras personas:



Lávese las manos
frecuentemente



Cubra su boca y su
nariz con el codo
flexionado cuando tosa
o estornude



Use pañuelos
desechables de un solo
uso y tirelos



Salude a otros sin
estrechar la mano, evite
los abrazos